

Digitálny stetoskop Littmann® CORE spoločnosti 3M™

Prehľadná príručka

Stiahnite si aplikáciu Eko z obchodu Apple App Store® alebo Google Play Store®.

Aktivujte bezdrôtovú technológiu Bluetooth® na svojom telefóne alebo tablete, spustíte aplikáciu a zapnete stetoskop CORE.


Eko

V balení

- Digitálny nastaviteľ Eko CORE a stetoskop Littmann® Cardiology IV™ od spoločnosti 3M™
- Prídavná súprava mäkkých tesniacich oliviek Littmann Snap Tight (malých) od spoločnosti 3M
- Nechladiivé puzdro
- USB napájací kábel
- Prehľadná príručka

Olivky

Olivky vložte smerom dopredu.

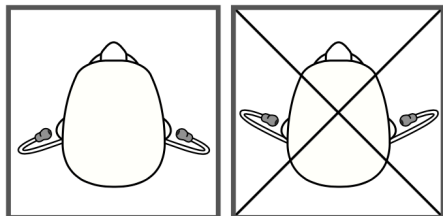

Hlasitosť

Na úpravu hlasitosti použite tlačidlá (+) a (-). K dispozícii je 7 úrovní hlasitosti.

Zapnutie a vypnutie

Keď je stetoskop CORE vypnutý, funguje ako nezosilnený stetoskop.

Ak chcete stetoskop CORE zapnúť, zatlačte vypínač dovnútra. Kontrolka začne blikať. V olivkách sa ozve zosilnený a odfiltrovaný zvuk.

Funkcie telemedicíny a umelej inteligencie

Aplikácia Eko má funkcie telemedicíny a umelej inteligencie, na využitie ktorých musíte mať predplatné softvéru (ak je k dispozícii, predáva sa zvlášť).

Predplatné si môžete nastaviť online na stránkach ekohealth.com

Aktívne potláčanie šumu

Stetoskop CORE má funkciu aktívneho potláčania šumu, ktorá odstraňuje hluk z okolitého prostredia. Aktívne potláčanie šumu môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Eko.



Notifikácie

(⦿) (bliká)

stetoskop CORE je zapnutý a vyhladáva zariadenia

● (žltá)

stetoskop CORE je vypnutý a nabíja sa

(●●) (žltá)

stetoskop CORE má takmer vybitú batériu

○

stetoskop CORE je zapnutý a pripojený

● (zelená)


stetoskop CORE je plne nabitý

(●●) (modrá)

stetoskop CORE nahráva

Nahrávanie

Po pripojení k aplikácii Eko môžete tlačidlom (o) začať nahrávanie.

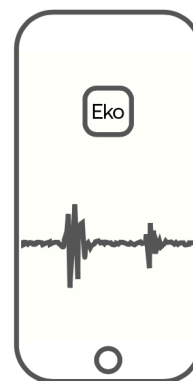

Nabíjanie

Pripojte mikro USB kábel k stetoskopu CORE a použite 5 V USB nabíjačku s certifikátom UL alebo označením CE. Úplné nabitie stetoskopu trvá približne 2 hodiny. Po úplnom nabití bude kontrolka svietiť na zeleno.

Návod na použitie

Pred použitím stetoskopu Littmann CORE si prečítajte návod na použitie. Návod nájdete na stránke: ekohealth.com/getstarted
Viac informácií o zariadeniach 3M nájdete na stránke HCBGregulatory.3M.com

Servis a podpora

V rámci USA nájdete informácie na stránke littmann.com/service alebo môžete zatelefonovať na číslo 1-800-228-3957. V prípade, že sa nachádzate mimo USA, navštívte stránku www.littmann.com, kde nájdete kontaktné informácie vašej miestnej kancelárie spoločnosti 3M.

sk

Apple App Store je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC.
Bluetooth® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Bluetooth SIG.
LBL 143 Rev B